

Paire d'amplificateurs auditifs - Réf. AB-1244

Woodland WHISPER ITE AC™

Mode d'emploi



EMBOUTS

Trois paires d'embouts de tailles différentes sont fournis avec la paire d'amplificateurs. Choisissez les embouts adaptés à la taille de votre oreille et montez-les sur chaque amplificateur. Puis enfoncez chaque amplificateur dans l'oreille suffisamment pour que les sons extérieurs soient bloqués lorsque l'appareil est éteint.

INSTALLATION DE LA PILE

Ouvrez la trappe du compartiment à pile avec votre ongle et insérez la pile comme indiqué sur le schéma (pôle négatif vers l'interrupteur), en enlevant le papier de protection auparavant. Utilisez une pile bouton auditive zinc-air A312.



INTERRUPTEUR

Poussez l'interrupteur sur la position « 0 » pour allumer l'appareil. Poussez l'interrupteur sur la position « I » pour l'éteindre.



VOLUME


Chaque amplificateur WW ITE AC possède une molette de contrôle du volume. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume. Tournez la molette dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour baisser le volume. Ne couvrez pas votre oreille ou l'amplificateur avec la main, il émettrait un sifflement aigu.



TONALITÉ

Avec un petit tournevis, réglez la tonalité : Pour obtenir un son plus grave, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour obtenir un son plus aigu, tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

« L » = Grave, « H » = Aigu

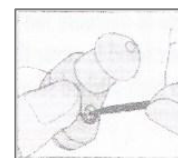

UTILISATION

1. Allumez en poussant l'interrupteur sur la position « 0 ».
2. Insérez l'amplificateur dans l'oreille. Assurez-vous que l'embout est bien ajusté dans l'oreille et parfaitement enfoncé sur l'amplificateur.
3. Réglez le volume avec votre doigt.
4. Après utilisation, éteignez l'amplificateur en poussant l'interrupteur sur la position « I ».

PRÉCAUTIONS

- Ce produit n'est pas étanche, il faut donc faire attention de ne pas laisser pénétrer de l'eau à l'intérieur. Au cas où de l'eau pénétrerait dedans, enlevez la pile et laissez sécher l'amplificateur dans un endroit tiède
- Il est important d'augmenter graduellement le volume pour éviter une brusque hausse de décibels.
- Ce produit n'est pas un appareil médical.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 1 pile A312 dans chaque oreillette
- Autonomie de la pile : 120-180 heures de fonctionnement
- Intensité du courant en fonctionnement : 0,6 – 2,3 mA
- Voltage : 1,0 – 1,6 V
- Poids avec pile : 2,8 g
- Bande de fréquence : 100 – 10 KHz + 6dB
- SSPL90 db (volume maximal) : 125 dB
- Amplification maximale : 105 dB
- Distorsion harmonique : < 2,2%
- EIN (bruit équivalent ramené à l'entrée) : <50 dB

GARANTIE

Ce produit est garanti pièces et main d'œuvre pendant deux ans après la date d'achat, en nos locaux, contre tout défaut de fabrication.

La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du produit, la mauvaise utilisation, la détérioration par suite d'un choc ou d'une chute, l'utilisation dans un but pour lequel il n'est pas conçu.

La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé, ou exposé à des températures extrêmes (inférieures à -20 °C ou supérieures à +60°C), ou non entretenu comme il convient, piles usées, appareil ayant été réparé par quelqu'un d'autre que ROC Import.

En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble du produit doit être retourné par l'utilisateur, en port payé, à l'adresse qui vous sera indiquée, accompagné de la photocopie de la facture d'achat datée et portant le cachet du revendeur ainsi qu'une note décrivant précisément l'anomalie rencontrée.

Pour connaître l'adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910 910 pour la France ou au +377 97 97 31 77 pour l'étranger. L'appareil sera réparé ou échangé pendant la période de garantie, et vous sera renvoyé gratuitement.

Cet appareil est fabriqué en Chine et importé des États-Unis par Roc Import.



ROC Import
B.P. 246
MC 98005 MONACO Cedex.
www.roc-import.com
email : info@roc-import.com