

Amplificateurs Ultra Ear™

Mode d'emploi

Mis à jour le 18.08.2010

REF GS-893

Sommaire


Découverte de l'Ultra Ear™	1
Mise en garde	2
Installer les piles	2
Installer Ultra Ear™ sur les oreilles	2
Utilisation	3
Réglage de la tonalité	3
Entretien	3
Caractéristiques techniques	4
Garantie	4

Découverte de l'Ultra Ear™

L'Ultra Ear™ est une paire d'amplificateurs auditifs légers, réglables en volume et en tonalité. L'Ultra Ear™ comporte un circuit de compression pour réduire les sons trop forts.

Contenu du coffret

2 amplificateurs, 2 tubes sonores, 6 embouts tulipes, 3 piles, 1 kit de nettoyage, 1 mode d'emploi.

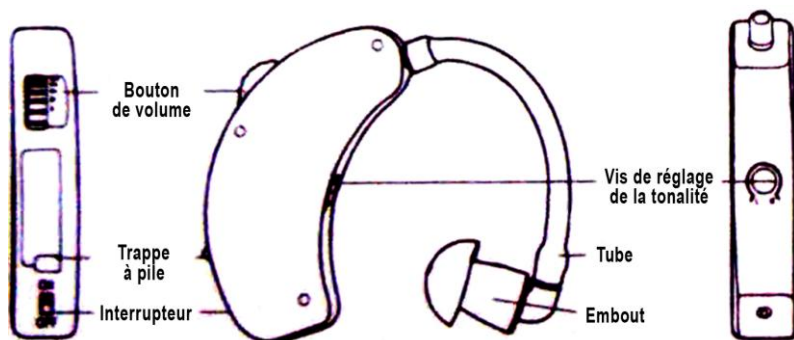


Mise en garde

- L'Ultra Ear™ n'étant pas étanche, veillez à ne pas laisser entrer d'eau à l'intérieur. Si par mégarde de l'eau y pénètre, enlevez la pile et laissez sécher l'appareil dans un endroit tiède et sec.
- Augmentez le volume GRADUELLEMENT pour éviter toute augmentation brutale du son.
- L'Ultra Ear™ n'est pas un appareil médical.

Installer les piles

Les amplificateurs Ultra Ear™ fonctionnent chacun avec une pile 1,5 V de type LR-44 ou zinc-air de type 675. Les piles durent entre 120 et 180 heures environ.

Pour installer la pile dans l'amplificateur, ouvrez la trappe du compartiment à pile à l'aide du doigt. Insérez la pile dans le sens approprié (voir le schéma ci-contre).

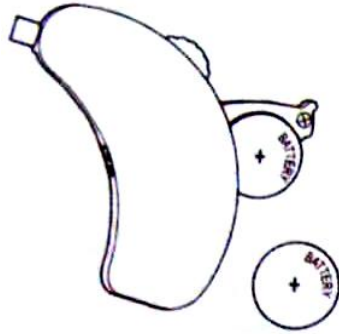

Installer Ultra Ear™ sur les oreilles



1. Placez les oreillettes derrière chaque oreille.
2. Tournez le tube dans la position appropriée pour l'oreille droite ou gauche.
3. Insérez l'embout dans chaque oreille. L'embout doit pénétrer profondément dans l'oreille.
4. Pour un meilleur confort, vous pouvez recouper le tube si vous sentez qu'il est trop long.



Utilisation

1. Vérifiez que la pile est bien en place.
2. Tournez le bouton du volume et réglez sur un niveau faible.
3. Placez l'embout dans l'oreille droite ou gauche.
4. Allumez l'appareil en basculant l'interrupteur sur ON.
5. Augmentez progressivement le volume jusqu'au niveau désiré.
6. Ne couvrez pas l'Ultra Ear™ avec votre main, cela provoquerait un bruit aigu.
7. Quand vous avez fini de vous servir de l'Ultra Ear™, afin de préserver la pile, placez l'interrupteur de chaque appareil sur OFF.



Réglage de la tonalité

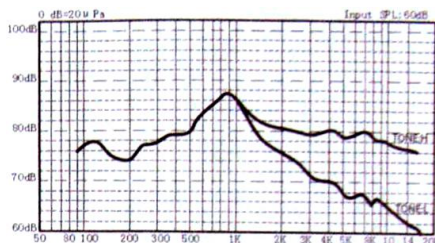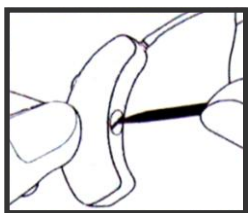

Utilisez le tournevis en plastique fourni pour régler la tonalité de L (Low = Basse) à H (High = Aiguë)

Entretien

- À l'aide de l'outil à pointe métallique fourni, passez dans l'embout de l'appareil pour enlever la cire qui s'y est déposée.
- Brossez l'embout avec la brosse souple fournie pour enlever la saleté et la cire.

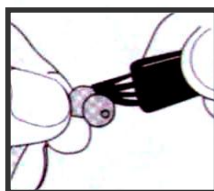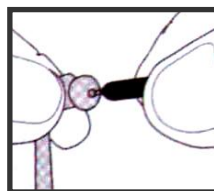

Caractéristiques techniques

- Autonomie de la pile 120-180 h de fonctionnement (pile LR-44)
- Intensité de fonctionnement 0,8 / 2,5 mA
- Tension de fonctionnement 1,0 / 1,8 V
- Consommation électrique 3mW
- Rapport Signal/Bruit >35 dB
- Réponse en fréquence 100 Hz / 15 KHz \pm 6 dB
- Sensibilité -8 dB
- Poids (pile incluse) 8,5 g

Garantie

Ce produit est garanti pièces et main d'œuvre pendant un an après la date d'achat, en nos locaux, contre tout défaut de fabrication.

La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du produit, la mauvaise utilisation, la détérioration par suite d'un choc ou d'une chute, l'utilisation dans un but pour lequel il n'est pas conçu.

La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé ou non entretenu comme il convient, piles usées, appareil ayant été réparé par quelqu'un d'autre que ROC Import.

En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble du produit doit être retourné par l'utilisateur, en port payé, à l'adresse qui vous sera indiquée, accompagné de la photocopie de la facture d'achat datée et portant le cachet du revendeur.

Pour connaître l'adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910 910 pour la France ou au +377 97 97 31 77 pour l'étranger. L'appareil sera réparé ou échangé pendant la période de garantie, et vous sera renvoyé gratuitement.

Les amplificateurs Ultra Ear™ sont importés des USA par ROC Import.



ROC Import
B.P. 246

MC 98005 MONACO Cedex.
Site Web : www.roc-import.com
Email : info@roc-import.com